

PROTOCOLO

RAZÃO PROTEÍNA / CREATININA URINÁRIA

Siga a gente nas redes sociais



www.citolabvet.com.br

RAZÃO PROTEÍNA / CREATININA URINÁRIA

UPC ou RPC

- Relação Proteinúria/Creatinúria
- Creatinúria: sem valor de referência
- Proteinúria: quanto menor, melhor
- Referência UPC

UP/C value		Substage
Dogs	Cats	
<0.2	<0.2	Non-proteinuric
0.2 to 0.5	0.2 to 0.4	Borderline proteinuric
>0.5	>0.4	Proteinuric

<http://www.iris-kidney.com/pdf/staging-of-ckd.pdf>

UPC: VALOR DA PROTEINÚRIA / VALOR DA CREATINÚRIA

DOSAGEM DE CREATININA URINÁRIA

- Kit de creatinina sérica
- Amostra diluída (1:25 ➡ 4800 microlitros de água e 200 microlitros de urina)
- Multiplicar resultado por 25

DOSAGEM DE PROTEÍNA URINÁRIA

- Amostra sem diluição
 - Hematúria e infecção aumentam a Proteinúria
 - Urina 24h refrigerada ou até 1 ano congelada
- Linearidade: até 100mg/dL

MAIS INFORMAÇÕES



www.citolabvet.com.br

